




SAFETY AT WORK

Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride

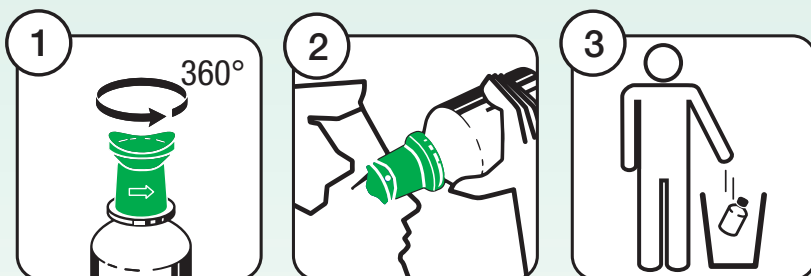

Otočte uzávěrem.

Vypláchněte oko.
Vyprázdněte láhev.

Prázdnou láhev
vyhoďte.

Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate



Vypláchněte oko roztokem Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (modrá očnice) předtím, než použijete roztok Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride (zelená očnice).



Otočte uzávěrem.

Roztokem Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate vypláchněte oko.
Vyprázdněte láhev.

Prázdnou láhev
vyhoďte.

Roztokem Plum Eyewash 0.9% Sodium Chloride vypláchněte oko.
Vyprázdněte láhev.

Vyhledejte lékařskou pomoc.