



# Technický list



## CLEAMEN 540




Objem: 1 L  
550 ml      Kód výrobku: VC540010097  
VC540005599

### Popis výrobku:

Bezoplachová dezinfekce povrchů a pokožky se širokým spektrem účinku. Používá se pro dezinfekci povrchů, nástrojů a pokožky v potravinářství, zdravotnictví i v ostatních provozech vyžadujících zvýšený dezinfekční režim. Je vhodná pro použití na nástroje, lůžka, gumovou obuv, laboratorní přístroje, vakuovačky, balíčky, koženku, plasty, laminát, nerezové plochy a technologie. Přípravek je určen k přímému použití a má vynikající dezinfekční účinky se širokým spektrem účinku. Neobsahuje aldehydy, není parfemovaný. Pro profesionální použití.

### Návod k použití:

Na ošetřované plochy aplikujte mechanickým rozprašovačem, nanesený prostředek neotírejte. Vydezinfikované povrchy, které přichází do přímého styku s potravinami, po uplynutí expoziční doby, opláchněte pitnou vodou. Lze jej použít i pro ponornou dezinfekci, například k dezinfekci pomůcek v holičství, kadeřnictví, kosmetických salonech, masérských salonech apod. Dezinfikované nástroje ponechte ponořené v koncentrátu dle doporučené doby působení (viz. tabulka) a před použitím opláchněte vodou. Spotřeba: 10 ml/m<sup>2</sup>.

					
	A	MRSA	V	(V)	(B)
	0,5-3 min	2 min	60 min	2 min	3 min
pH 6,5-7,0					

### Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina  
pH: 5,0-6,0  
Barva: Bez barvy  
Vůně: Charakteristický



### Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

	Kusů v kartonu	Kartonů ve vrstvě	Vrstvy na paletě	Kusů na paletě
1 L	12	8	4	384
550 ml	14	10	7	840

### Složení:

VAROVÁNÍ.

Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

### Výrobce:

CORMEN, s.r.o., 593 01, Věchnov 73  
Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822  
E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz

Vytvořeno dne: 8.7.2022